

酷博視拋棄式軟性隱形眼鏡

CooperFlex Premium Soft Contact Lens

衛署醫器輸字第 014398 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

產品規格

材 質：methafilcon A

含 水 量：55%

基 弧：8.70 mm, 8.40mm* (in minus powers only)

直 徑：14.4 mm

度 數：-0.25 to 8.00 DS (0.25DS steps)

- 8.50 to -10.00 DS (0.50DS steps, 8.7mm only)

+ 0.25 to +8.00DS (0.25DS steps)

中心厚度(@-3.00DS)：0.09mm

Dk : 17

Dk/t(@-3.00DS at center) : 19

邊緣厚度：0.07mm

視力區 : 8.0 mm

顏 色：Light Blue (淡藍色)

配戴指示：日戴型

包 裝：3 個單包裝/盒、6 個包裝/盒

產品用途：近視、遠視、視力矯正，須經眼科醫師處方使用。

本產品為雙週更換。

使用說明：

- 在配戴隱形眼鏡之前要洗手並擦乾雙手。
- 在拿取隱形眼鏡前，確認隱形眼鏡是浸潤在藥水中。
- 確認隱形眼鏡產品包裝封口是密封的。
- 隱形眼鏡是屬於個人的，不可與別人共用的。

配戴隱形眼鏡步驟：

1. 配戴隱形眼鏡前，確認隱形眼鏡與眼睛的接觸面〔稱之為內面〕無外翻。放置在食指間上確認其正確的形狀〔如圖 1 & 圖 2〕。



圖 1



圖 2

2. 使用另一隻手的食指與第二隻手指輕往上抓上眼瞼，使用第三隻手指輕將下眼瞼往下拉。再將隱形眼鏡戴上〔如圖 3〕，重複此程序戴另一隻隱形眼鏡



圖 3



圖 4

取下隱形眼鏡步驟：

1. 向下看並輕壓下眼瞼。
2. 在以食指與拇指輕捏與取出隱形眼鏡之前，請慢慢將隱形眼鏡滑向下眼白處以方便取出隱形眼鏡〔如圖 4〕。重複此程序取下另一隻隱形眼鏡。

隱形眼鏡的消毒與浸泡：清潔和消毒隱形眼鏡要嚴謹依照您所選用藥水的指示，或遵照眼科醫師或配鏡師的指示。

若隱形眼鏡乾燥時：再以潤濕液或消毒液或浸泡液濕潤它，然後再依照消毒或浸泡程序。

注意事項：

1. 軟式隱形眼鏡是為了經常性的替換而設計的。眼科醫師或配鏡師會告知您配戴及取下隱形眼鏡、鏡片清潔及更換鏡片之正確方法。不要隨意變更這些正確方法，如果有任何疑問可諮詢您的眼科醫師或配鏡師。
2. 取下軟式隱形眼鏡後，要依照指示消毒或浸泡鏡片。
3. 若眼睛變紅或有過敏現象或疼痛，請立即取下軟式隱形眼鏡並諮詢眼科醫師。
4. 避免化妝品、噴劑污染軟式隱形眼鏡，或戴著軟式隱形眼鏡接近有毒氣體。
5. 將有破損的、污染的或有刮傷的軟式隱形眼鏡立即更換。
6. 避免長指甲，因為長指甲易藏有害細菌，而造成眼球刮傷進而造成眼球發炎。
7. 避免放置小孩易拿到之處。
8. 水上運動時，若配戴軟式隱形眼鏡時，必須配戴蛙鏡。

警語：

1. 避免配戴軟式隱形眼鏡睡覺，除非您的眼科醫師或配鏡師告知您如此做是安全無虞。
2. 避免配戴軟式隱形眼鏡時間超過您的眼科醫師或配鏡師所推薦之配戴時間。
3. 避免使用家用清潔產品在您的軟式隱形眼鏡上。
4. 當您配軟式隱形眼鏡時，避免使用眼藥水。除非您的眼科醫師或配鏡師告知您可以使用。
5. 避免使用唾液濕潤您的軟式隱形眼鏡。
6. 避免使用自來水沖洗軟式隱形眼鏡儲存盒。

製造廠名稱：CooperVision Manufacturing Limited

製造廠地址：South point, Hamble, Southampton, SO31 4RF, UK.

藥商名稱：酷柏光學股份有限公司

藥商地址：臺北市中山區新生北路一段 66 號 6 樓