

“酷柏”佰美視晴潤散光日拋軟性隱形眼鏡

“CooperVision” Biomedics® 1 day Extra Toric Soft Contact Lenses

醫器醫器字第 024428 號

使用的簡務必詳閱原廠之說明書並遵照指示使用。

重要資訊：
 如有任何關於眼科醫器或產品之參考，眼科醫器或業者須提供此類患者且配合患者之處方或鏡片的指導手續及資訊手續。

符號	處方
	警告：本裝置含有供藥的溶劑或防腐劑。
	請參照仿單。
	有效日期。
	使用須嚴格滅菌。

產品說明

“酷柏”佰美視晴潤散光日拋軟性隱形眼鏡是日拋型並為每日拋棄鏡片。其鏡片由含水性 2-hydroxyethyl methacrylate 和 methacrylic acid 聚合物與 ethylhexane dimethacrylate (45%) 和水 (55%) 交叉結合製成之。並鏡片為淡黃色易於操作使用。

鏡片規格

直徑	12.5 mm ~ 14.0 mm
中心厚度	0.025mm ~ 0.270mm (依度数決定)
基弧	6.50mm ~ 10.8 mm
度數	-3.00D ~ +2.00D
散光度數	-0.25D ~ -1.00D
軸心	10° ~ 180° (每10度為一階)

鏡片的特性如下：

折射率	1.41
鏡片表面親水性	
含水量	55%
透氧率 (DK)	19.7 x 21 x 10 ⁻¹⁸ (cm ² /sec/μm)
	(在厚度35倍以Fut Method)
透光率	90% to 97%, depending on tint type

作用：在含水狀態，放在人的角膜上，其作用就像一個折射轉彎鏡使光線集中於視網膜。

適應症：近視、遠視散光矯正。

禁忌症（不使用的理由）

患者倘若有下列情況，不應使用“酷柏”佰美視晴潤散光日拋軟性隱形眼鏡：

- 眼球的任何發炎。
- 任何眼瞼炎腫，外傷，或影響角膜、結膜，或眼球的異常。
- 眼瞼微生物感染。
- 淚液不足。
- 角膜炎或乾眼症。
- 眼疾可逆性，眼瞼感染或因配戴隱形眼鏡所引起不良作用或不能忍受或眼瞼部正常反應之病史者。
- 不能依照隱形眼鏡配戴程序及保養程序者。
- 認為可能，瞼部、生心、病狀、前作用或工作生評環境不能依照或不願意遵照配戴程序或保養程序者。

- 對於保養隱形眼鏡必需使用的溶液中的成份，如防腐劑或藥，過敏。
- 提供視力矯正者使用，若不使用或不能維持隱形眼鏡配戴與保養程序之要求者不能提供配鏡。

警告：

請將眼鏡裝進如下特標狀況的病患不予配戴隱形眼鏡：
 ● Rose Bengal染色(121)試驗。
 ● Fluorescein染色>12/15等級。
 ● 角膜康康的階級：8.0-4等級

廠內有別提出下列的警告：

● 有別於說明書所載隱形眼鏡保養產品可能導致隱形眼鏡的傷害，病患必需將說明書所載的指示以及相關說明書以正確使用隱形眼鏡及隱形眼鏡保養產品，包括隱形眼鏡盒。相關的困難，包括角膜炎，可能引起視力或視物喪失。日拋型鏡片，不可重複使用，眼睛若有異常時不可配戴。臨床研究已經顯示，配戴鏡片過久會增加負面的反應的嚴重性。研究顯示吸菸的人配戴隱形眼鏡比不吸菸的人更可能發生副作用。如果患者感到眼睛不舒服，眼淚過多，視力改變，眼睛發紅或其他問題，應立即摘除指示的鏡片，並立即聯絡眼科醫師。

注意事項：

- 隱形眼鏡配戴者可能不適合某些特定職業，需要有保護眼睛之器具。
- 必須避免過熱、灰塵與蒸汽或多風的環境。
- 不可用唾液或專用溶液之外的液體潤滑隱形眼鏡。
- 化妝品、化妝水、肥皂、乳液、除臭劑、或噴霧避免靠近眼睛或接觸鏡片，可能造成鏡片破裂或損傷。
- 鏡片切勿可與眼睛接觸或與皮膚產生任何接觸。
- 勿用鑷子或其他工具從保潔隱形眼鏡盒中取出隱形眼鏡，將隱形眼鏡裝回手中。
- 應配戴及取下眼鏡時可將手指取下隱形眼鏡。



- 除鼻劑、或噴劑或眼藥水或沾到鏡片，油性化妝品比水性化妝品更有可能損壞鏡片。
- 如眼睛的組織合外來材料，請勿用手或手指擦鏡片，因為可能造成眼睛發炎、疼痛或紅腫。
- 配戴隱形眼鏡時應避免任何有害性或刺激性蒸氣和煙霧。
- 向眼瞼保健師人員詢問關於醫器或隱形眼鏡的配戴。
- 告知醫師（包括配鏡人員）有配戴隱形眼鏡。
- 處方單上有配戴隱形眼鏡，有些工作可能將需要使用眼瞼保護裝置或要求病患不可配戴隱形眼鏡。
- 無論何種隱形眼鏡，皆需要追蹤以確保健康。應指示病患適當的追蹤時程。

副作用：

患者如可能發生下列問題：

- 眼睛發紅。
- 眼睛刺痛、刺痛或癢。
- 可能比第一次戴鏡片時更不舒服。
- 可能感覺眼睛裏有東西（外物、磨傷的部位）。
- 淚水過多。
- 不正常增加分泌物。
- 眼睛發澀。
- 視力不佳，物體周圍出現光暈或畏光。
- 眼睛顏色改變。
- 感覺如眼睛乾乾。

如有上述症狀出現應依下列指示：

- 立即停止配戴鏡片。
- 如果不停或症狀持續停止，應仔細檢查鏡片。
- 如果鏡片太厚，或有外來物或腐蝕停止時，應清潔與潤滑鏡片，或將鏡片丟棄換上新鏡片。
- 如果鏡片有任何污損，請立即將鏡片丟棄。
- 重新戴上新的鏡片後，如果症狀繼續存在，患者就不應該配戴隱形眼鏡，而應諮詢其眼科醫藥業者或醫生。若發生任何前述之症狀，患者必須告知可能的環境狀況，像是煙草、角膜炎發病、角膜的新生血管化，或可能出現眼膜炎。患者應聯絡配鏡師，把鏡片拿下，並立即尋求專業人員鑑定問題，並且立即治療，以避免眼睛嚴重受損。

配戴鏡片的保養

配戴隱形眼鏡應以清潔、曝曬在空氣中，其表面會變乾且逐漸失去水份，倘若發生此種情形，應將鏡片丟棄，使用新鏡片。

沾黏鏡片的保養

如果鏡片黏在眼球上（或不再移動），應該指示患者直接將眼睛閉上並使用潤滑劑，或將眼睛繼續閉到眼睛痛。等到鏡片能夠移動後再取出。如果鏡片黏以後鏡片仍然沒有移動，患者應諮詢其眼科醫藥業者。

如何供藥：

酷柏“佰美視晴潤散光日拋軟性隱形眼鏡是裝在附有含鹽緩衝液的眼睛封套包裝中，並於藥房供貨，每一包內均應註有鏡片的基弧、直徑、透光度數、與配戴及到期日。如果包裝已經破損，請勿使用。

包裝：5片/盒，10片/盒，15片/盒，20片/盒，30片/盒

製造商名稱：CooperVision Caribbean Company
 製造商地址：500 Road 584, Lot 7, Amalae Industrial Park,
 Juan Diaz, PR 00795, U.S.A.

總經銷名稱：聯欣光學股份有限公司
 總經銷地址：臺北市中山區新生北路一段66號6樓