

**“酷柏”佰美視睛潤日拋軟式隱形眼鏡**  
**“CooperVision” Biomedics® 1 day Extra (ocuficon D) Soft Contact Lenses**

使用前請務必詳閱本說明書之使用說明書並遵照指示使用

**重要資訊：**

此說明書僅供註冊專業人員(眼科醫師/驗光師)或配鏡參考。  
 眼科專業人員須詳讀配戴者滿意之處方鏡片的說明書後再配戴與手術。

**行研務索：**

下列符號可能出現在標籤或包裝上。

	<b>注意：</b> 本包裝上有裝卸的請看標籤說明書。
	請參閱標籤說明書。
	有效期日期。
	批號。
	使用說明書。

**產品說明：**“酷柏”佰美視睛潤日拋軟式隱形眼鏡其鏡片的材料是由水 (55%) 和聚水(2-hydroxyethyl methacrylate 和 methacrylic acid) 聚合物(55%) 聚合而成製成的。這鏡片為淡藍色 (Opti Blue™) 是特別研製而成。

**“酷柏”佰美視睛潤日拋軟式隱形眼鏡的物理系數如下：**

別解熱 (23°C)	1.41
透光率	>95%
含水量	55.0%
透氧率	19.6x10 <sup>-10</sup> (cm <sup>2</sup> /sec) @ 37°C / (ml x mm Hg) at 35°C (Gutt Method)

**“酷柏”佰美視睛潤日拋軟式隱形眼鏡為超薄型片，規格如下所示：**

直徑	12.0 mm ~ 14.0 mm
厚 度	0.50 mm ~ 0.30 mm
度數範圍	-20.00 ~ +3.00D
中心厚度	0.075 mm ~ 0.40 mm
鏡片顏色	淡藍色。

作用：在含水的環境下，“酷柏”佰美視睛潤日拋軟式隱形眼鏡放在人的角膜上，其作用就像一個新對好透鏡，使光線準中於視網膜。

**適應症：**“酷柏”佰美視睛潤日拋軟式隱形眼鏡是為每日配戴而用來矯正非高度近視、眼弱、眼痛者之超光型(近視及遠視)，鏡片厚度在 2.00 度或以下。

**禁忌症 (不使用的理由)：**

參看表中有下列情況，不應使用“酷柏”佰美視睛潤日拋軟式隱形眼鏡：

- 曾裝於眼有急性炎症 Sjogren 氏症眼淚減少以及可能與機帶性 Sjogren 氏症有關的自體免疫眼病疾病。包括角膜屈折變炎、多變型、Kerato 氏病、多型性乾眼病、全身性硬皮症、慢性皮膚性濕疹、以及綜合性結膜角膜炎或眼病。
- 眼前房急性或慢性炎症、或感染。
- 任何眼病或眼疾、外傷、或眼手術後、結膜、或眼球的異常反應。
- 任何可能導致眼痛、或可能引起配戴隱形眼鏡而使眼痛的系统疾病。如眼痛變紅眩暈痛。
- 對配戴隱形眼鏡或隱形眼鏡液中所含成份(如氯或磷)過敏。

**警告：**

- 除少數情況如以下特殊情況的情形不適合配戴隱形眼鏡：  
 . Rose Bengal 染色 12/18 等級  
 . Fluorescein 染色 12/18 等級  
 . 驗光鏡後驗光 3/0 - 4 等級

**應向病患提出下列的警告：**

- 有問題的隱形眼鏡和隱形眼鏡保養產品可能導致眼睛嚴重的傷害。警告患者應遵照原廠業者所指示以及標籤說明書上正確使用隱形眼鏡及隱形眼鏡保養產品。包括正確地檢查、眼睛的問題。包括何時應停戴。可能迅速退化並導致失明。白膜型問題。不可配戴隱形眼鏡。眼睛顯示急性炎時不可配戴。眼睛慢性炎症時。戴鏡片時患者應注意面部的異常。研究顯示很低的氧氣透氣率比不佩戴的人更可能發生副作用。如果患者感到眼睛不舒服、眼睛發紅、視力改變、眼睛刺痛或其他問題，應立即卸掉所戴的取下鏡片，並立即聯絡眼科醫師。

**注意事項：**

對眼科專業人員：

- 由於其數量、折光度、散光程度、鏡片材料的種類。大多數都沒有經過評估。因此，選擇適合的鏡片設計和參數時，眼科專業人員應考慮到患者年齡和配戴各個階段的適應性。包括近視、遠視、散光、中心與周邊視度以及散光散光程度。這些因素對配戴者視力/鏡片在影響。此評估應考慮到對新對的適應性。因此眼科專業人員應確保在選擇鏡片的功效和配戴適應性的視力矯治。
- 應仔細審查這些因素對配戴者視光矯正的需求與影響。因此，眼科專業人員應根據仔細驗光後所得的視度書及隱形眼鏡的性質。
- Fluorescein 一種藍色染料，會使用於驗光時。隱形眼鏡會吸收此染料而變色。Fluorescein 在服用時，應以應均與角膜生理性鹽水清洗眼睛。
- 眼科專業人員應配戴者可以快捷準確的取下隱形眼鏡。或有人在取鏡時。



- 眼科專業人員應指示患者當眼紅腫或發炎時立刻取下鏡片。  
 眼科專業人員應仔細指示配戴者下列特殊事項和安全告知：  
 . 切勿將水不可用直接。這並非所有的帶到所有的隱形眼鏡液是完全的。那必使用正確液體。  
 . 配戴鏡片之前一定要洗手，勿用化妝品、化妝水、肥皂、乳液、牙膏、或潤滑油類或油類鏡片，油性化妝品比水性化妝品更有可能傷害鏡片。  
 . 如果眼睛剛使用完眼部護理產品。例如眼藥水。應行警告指示禁用。請詳細閱讀。當眼睛有刺痛或紅腫。  
 . 如果眼睛剛滴完含有毒材料、難用手工接觸液體。因為可能造成眼睛的損傷。導致發熱、或導致失明。  
 . 請勿配戴隱形眼鏡到游泳。  
 . 請勿配戴隱形眼鏡到熱水浴。  
 . 不可配戴隱形眼鏡超過眼科專業人員所建議的時間。  
 . 使用高倍放大鏡或顯微鏡。切勿用鏡。  
 . 除眼鏡外配戴隱形眼鏡 (不戴任何眼鏡) 讓遠視 (戴) 變明的配戴者。為了持續保險的保護，鏡片應能在眼上自由移動。如果鏡片不能自由移動，患者應立刻聯絡眼科醫師。

**備用字樣字號 G22762 號**

- 經玻璃片碎應避免有傷或向內傷的磨損和過程。
- 不可用後由鏡片或其他工具將鏡片從容器中取出，除非有特別指示。
- 不應直接將鏡片取出。
- 要小心處理鏡片，勿觸摸。
- 在戴新的鏡片前配戴，應詢問眼科專業人員。
- 警告如眼科專業人員的指示和標籤說明書。
- 在使用任何隱形眼鏡之前，一定要諮詢眼科醫師。
- 警告如專業人士在配戴隱形眼鏡時，有工作可能須要使用隱形眼鏡時，或需要多事不脫隱形眼鏡工作。
- 在配戴隱形眼鏡之前，應先檢查眼睛的屈光矯正，以確保患者眼睛的健康。應先檢查視力遵守建議的諮詢時間。

**副作用：**

- 潛在的配戴者，配戴隱形眼鏡可能產生下列問題：  
 . 眼干可能出現乾燥、癢(刺痛)或其他眼睛痛。  
 . 隱形眼鏡久戴可能引起配戴不適。  
 . 可能導致眼痛或眼疾(食物、剩餘部分)。  
 . 淚水過多。  
 . 不正常的眼睫分泌。  
 . 眼痛發紅。  
 . 除眩暈(視力不清)。  
 . 虹膜變暗 彩虹光環。  
 . 畏光。  
 . 眩暈。

如果配戴者發生任何上述情形，應指示：立刻取下隱形眼鏡。  
 . 如果不好處理問題不得處理。仔細諮詢眼科醫師。包括諮詢眼科醫師的式樣問題。何時停止配戴隱形眼鏡。如何處理眼疾在從配戴者諮詢專業人員諮詢。

發生任何上述情形時，也可能出現眼痛、發熱、有眼痛、眼充血、或眼痛等。應先諮詢眼科專業人員諮詢。應先諮詢眼科專業人員諮詢。應先諮詢眼科專業人員諮詢。

**配戴時應：**

配戴時應由眼科醫師決定。如配戴者每日配戴隱形眼鏡應增加時間。從最低配戴時間起。由眼科專業人員決定配戴時間並非必要。

**每日配戴：**

**“酷柏”佰美視睛潤日拋軟式隱形眼鏡每日拋型鏡片規格。**

天數	3	4	6
小房數**	4	6	8

\*所有配戴者均應。

**不可配戴隱形眼鏡時：**

- 應先諮詢眼科醫師或眼科專業人員 (非 Sjogren 氏症) 相對的適應症的症狀不適症狀的配戴者應配戴者改善諮詢眼科醫師於其配戴式樣及隱形眼鏡。如果配戴者無眼痛或眼痛。

**配戴鏡片的保養：**

款式增加配戴者在配戴 10 分鐘或更久，可能會覺得更難受，必須更換新鏡片。

**如何供應：**

每包“酷柏”佰美視睛潤日拋軟式隱形眼鏡是在附有透氣膜密封的包裝內。裡面有三個。每包外封封有鏡片的形、度數、直徑、或製造日期及有效期間。

**請勿使用已用過或破損之包裝。**

**包裝數量：**10片/盒、15片/盒、20片/盒、30片/盒

**製造廠名稱：** Cooper Vision Caribbean Corporation  
**製造廠地址：** 500 Road 534, Lot 7, Amelias Industrial Park, Juma Dia, Puerto Rico 00795, USA  
**總代理商名稱：** 鼎柏光學儀器有限公司  
**總代理商地址：** 台北市104中山區南京路一段66號6樓