



酷柏優氧高透氣矽水膠隱形眼鏡
CooperVision Super-Air Silicone Hydrogel Contact Lenses
新可孚號：德國視明詳外貿
新可孚公司名稱：CooperVision Caribbean Corporation
製造廠址：500 Road 584, Lot 7, Amealas Industrial Park,
Juna Diaz PR 00755, USA
總經理：台北市中山區新生北路一段66號6樓
服務專線：0800-389-318
Website: www.coopervision.com.tw

據因素，如環境條件(高度、地理、雲層)和個人因素(戶外活動的範圍和性質)。含抗紫外線隱形眼鏡有助防護有害的紫外線輻射。然而，未進行臨床研究證明，配戴含抗紫外線隱形眼鏡可減少發生白內障或其他眼疾的風險。若需進一步資訊，請洽詢眼科專業人員。

本產品(-6.00D)能阻斷90%以上的紫外線A和99%以上的紫外線B。本產品對紫外線的阻隔力會隨著鏡片厚度增加。

作用：

本產品在水合狀態放在角膜上時，其折射介質會將光線聚焦於視網膜上。

適應症：

本產品適用於每日配戴以矯正屈光不正(近視和遠視)，但無眼睛疾病。且散光在200度或以下、不影響視力情況下的病患。

註：請遵循眼科專業人員訂定的配戴時程配戴及清潔、消毒與定期更換鏡片。

每次取下隱形眼鏡時必須清潔、沖洗和消毒鏡片。並依眼科專業人員建議配戴期限丟棄鏡片。

當訂定配戴或更改配戴時，鏡片僅能使用化學性隱形眼鏡藥水進行消毒。

禁忌症 (不使用的理由)：

有下列情況，勿使用本產品：

◆ 視前房急性或亞急性炎症、或感染。

◆ 任何眼睛疾病、外傷、或影響角膜、結膜或眼瞼的異常狀況。

◆ 眼瞼淚液分泌不足(乾眼症)。

◆ 角膜感覺遲鈍(角膜敏感性降低)。

◆ 因配戴隱形眼鏡任何可能影響眼睛或惡化的全身性疾病。

◆ 因配戴隱形眼鏡引起眼睛過敏產生或惡化。

◆ D.嚴謹遵守鏡片的保養指示，包括隱形眼鏡盒清洗，可降低潰瘍性角膜炎總體風險。

E.配戴隱形眼鏡者中，罹患潰瘍性角膜炎的風險估計吸煙者比不吸煙者高3~8倍。

F.如果配戴者出現眼睛不適、大量淚液、視力改變，眼睛發紅或其外問題，應立即取下鏡片，並立即諮詢眼科專業人員。

◆ 對隱形眼鏡保養液中的任何成份過敏者，如水銀或thimerosal需小心使用本產品。

◆ 任何造成角膜感染(細菌、黴菌或病毒)。

◆ 眼鏡變紅或刺激感。

◆ 未能遵從隱形鏡片清潔者。

注意事項：

對眼科專業人員：

◆ 由於參加臨床調查人數不多，鏡片材料中可用的所有屈光度、設計構造或試驗參數均未被大量評估。因此，當選擇合適的鏡片設計和參數時，眼科專業人員應考慮鏡片的所有特性，影響透鏡性能和眼部健康，包括透氣性、潤濕性、中心和外圍厚度以及視區直徑。

◆ 這些潛在影響因素對配戴者眼睛健康有關應仔細評估其配戴者對矯正折射的需求。因此，眼科專業人員應持續對配戴者的眼球健康和鏡片矯正的效果做追蹤監測。

◆ 配戴凹面球面隱形眼鏡以矯正遠視的患者可能無法達到遠視或近視的最佳矯正視力。在為每個患者選擇最合適類型的鏡片時，應考慮其視覺需求並隨個人需求而變化。

◆ 未重複使用或存於隱形眼鏡盒中的藥水，因為重複使用隱形眼鏡藥水會降低消毒效果，也可能導致嚴重感染、視力喪失或失明。

2.搓揉與沖洗時間：

使用說明：

配戴者應依多機能隱形眼鏡藥水標示的搓揉和沖洗時間以使鏡片達到適當的消毒。

警告：

◆ 依建議的時間搓揉及沖洗鏡片，可預防嚴重的眼部感染。

◆ 不使用水、生理食鹽水或潤濕液消毒鏡片。這些溶液無消毒效果，未使用建議的消毒藥水會導致嚴重感染，視力喪失或失明。

3.隱形眼鏡盒的清潔：

使用說明：

◆ 使用新鮮、無菌隱形眼鏡保存液沖洗/清潔液與輕搓隱形眼鏡盒，勿使用水、清潔劑或隱形眼鏡盒應以新鮮的無菌隱形眼鏡盒，勿使用水沖洗/沖洗(不使用水)，並以建議的乾淨紙巾擦乾隱形眼鏡盒，勿使用任何其他清潔方法。勿在使用後自然風乾或蓋上隱形眼鏡盒蓋，請確保乾燥前鏡片盒中無殘留的藥水。

◆ 依眼科專業人員的建議或是隱形眼鏡盒製造商的標籤說明，定期更換鏡片盒。

◆ 隱形眼鏡盒可能為細菌生長的來源。

警告：

◆ 不用或未經滅菌的溶液儲存鏡片或沖洗隱形眼鏡盒。僅使用新鮮的多機能藥水，可預防鏡片或鏡片盒的污染。使用未經滅菌的溶液會導致嚴重感染、視力喪失或失明。

4.水上活動：

使用說明：

配戴隱形眼鏡時，勿讓鏡片曝露於水中。

警告：

◆ 水可能含導致嚴重感染、視力喪失或失明的微生物。如在泳池、湖泊或海洋游泳時，鏡片浸沒在水中，請將其丟棄更換新的。請諮詢眼科醫師關於任何從事水上活動期間配戴鏡片的建議。

5.多功能藥水拋棄日期：

使用說明：

◆ 不使用過期的消毒藥水。

◆ 拋棄日期是指開瓶後安全使用隱形眼鏡保養液的時間，它與有效期限不同，有效期限是指產品未開封前仍能有效使用的最終日期。

警告：

◆ 使用過期的多功能藥水可能引起藥水污染，並導致嚴重感染、視力喪失或失明。

◆ 為避免感染，請勿碰觸藥水瓶口任何表面。

◆ 為避免污染藥水，請勿更換藥水的瓶子或容器。

◆ Human Crystalline Lens(25 year old person)

·····: Human Cornea(24 year old person)

—: Super-Air



1.Leman S. Radiant Energy and the eye, MacMillan, New York, 1980 P.58, fig 2-21

2.Waxler, M., Hitchins, V.M., Optical Radiation and Visual Health, CRC Press, Boca Raton, Florida, 1986, p.10 fig. 5

3.警告：抗紫外線隱形眼鏡不能取代抗紫外線眼鏡，如抗紫外線護目鏡或太陽眼鏡，因抗紫外線隱形眼鏡不能完全覆蓋眼睛和眼睛周圍。患者應依指示繼續使用抗紫外線眼鏡。

長時間曝露於紫外線是白內障相關的風險因子之一。曝露依

研究已說明，配戴著鏡片過夜會增加嚴重不良反應的風險。

◆ 研究說明吸煙者配戴隱形眼鏡的不良反應發生率高於非吸煙者。

◆ 配戴者應注意，妥善使用和護理隱形眼鏡和鏡片護理產品，包括鏡片盒，對於安全使用這些產品的重要性。配戴者須遵守眼科醫生的指示和產品標籤說明，以正確使用鏡片和鏡片護理產品。配戴者需每次使用新鮮的溶液存放鏡片，勿重複使用溶液。此外，應根據眼科醫生的建議，每次使用之間要清潔，沖洗眼鏡盒。眼睛問題包括角膜潰瘍，可以迅速發展，導致視力喪失。

◆ 有問題的隱形眼鏡和隱形眼鏡保養產品可能導致眼睛嚴重的傷害。病患必需遵循眼科專業人員的指示標籤及說明書以正確使用隱形眼鏡及隱形眼鏡保養產品，包括隱形眼鏡盒。

◆ 研究結果顯示：

A.日戴型配戴者的潰瘍性角膜炎的總年發生率估計為每萬人約

4.1人，在長戴型配戴者中約為每萬人約有209人。

B.對於長戴型配戴者而言，潰瘍性角膜炎的風險是日戴型配戴者的約5倍。

C.日戴型配戴鏡片過夜（不在核准適應症內），潰瘍性角膜炎的風險是不配戴鏡片過夜者的9倍。

D.嚴謹遵守鏡片的保養指示，包括隱形眼鏡盒清洗，可降低潰瘍性角膜炎總體風險。

E.配戴隱形眼鏡者中，罹患潰瘍性角膜炎的風險估計吸煙者比不吸煙者高3~8倍。

F.如果配戴者出現眼睛不適、大量淚液、視力改變，眼睛發紅或其外問題，應立即取下鏡片，並立即諮詢眼科專業人員。

◆ 對隱形眼鏡保養液中的任何成份過敏者，如水銀或thimerosal需小心使用本產品。

◆ 任何造成角膜感染(細菌、黴菌或病毒)。

◆ 眼鏡變紅或刺激感。

◆ 未能遵從隱形鏡片清潔者。

注意事項：

對眼科專業人員：

◆ 由於參加臨床調查人數不多，鏡片材料中可用的所有屈光度、設計構造或試驗參數均未被大量評估。因此，當選擇合適的鏡片設計和參數時，眼科專業人員應考慮鏡片的所有特性，影響透鏡性能和眼部健康，包括透氣性、潤濕性、中心和外圍厚度以及視區直徑。

◆ 這些潛在影響因素對配戴者眼睛健康有關應仔細評估其配戴者對矯正折射的需求。因此，眼科專業人員應持續對配戴者的眼球健康和鏡片矯正的效果做追蹤監測。

◆ 配戴凹面球面隱形眼鏡以矯正遠視的患者可能無法達到遠視或近視的最佳矯正視力。在為每個患者選擇最合適類型的鏡片時，應考慮其視覺需求並隨個人需求而變化。

◆ 未重複使用或存於隱形眼鏡盒中的藥水，因為重複使用隱形眼鏡藥水會降低消毒效果，也可能導致嚴重感染、視力喪失或失明。

2.搓揉與沖洗時間：

使用說明：

配戴者應依多機能隱形眼鏡藥水標示的搓揉和沖洗時間以使鏡片達到適當的消毒。

警告：

◆ 依建議的時間搓揉及沖洗鏡片，可預防嚴重的眼部感染。

◆ 不使用水、生理食鹽水或潤濕液消毒鏡片。這些溶液無消毒效果，未使用建議的消毒藥水會導致嚴重感染，視力喪失或失明。

3.隱形眼鏡盒的清潔：

使用說明：

◆ 使用新鮮、無菌隱形眼鏡保存液沖洗/清潔液與輕搓隱形眼鏡盒，勿使用水、清潔劑或隱形眼鏡盒應以新鮮的無菌隱形眼鏡盒，勿使用水沖洗/沖洗(不使用水)，並以建議的乾淨紙巾擦乾隱形眼鏡盒，勿使用任何其他清潔方法。勿在使用後自然風乾或蓋上隱形眼鏡盒蓋，請確保乾燥前鏡片盒中無殘留的藥水。

◆ 依眼科專業人員的建議或是隱形眼鏡盒製造商的標籤說明，定期更換鏡片盒。

◆ 隱形眼鏡盒可能為細菌生長的來源。

警告：

◆ 不用或未經滅菌的溶液儲存鏡片或沖洗隱形眼鏡盒。僅使用新鮮的多機能藥水，可預防鏡片或鏡片盒的污染。使用未經滅菌的溶液會導致嚴重感染、視力喪失或失明。

4.水上活動：

使用說明：

配戴隱形眼鏡時，勿讓鏡片曝露於水中。

警告：

◆ 水可能含導致嚴重感染、視力喪失或失明的微生物。如在泳池、湖泊或海洋游泳時，鏡片浸沒在水中，請將其丟棄更換新的。請諮詢眼科醫師關於任何從事水上活動期間配戴鏡片的建議。

5.多功能藥水拋棄日期：

使用說明：

◆ 不使用過期的消毒藥水。

◆ 拋棄日期是指開瓶後安全使用隱形眼鏡保養液的時間，它與有效期限不同，有效期限是指產品未開封前仍能有效使用的最終日期。

警告：

◆ 使用過期的多功能藥水可能引起藥水污染，並導致嚴重感染、視力喪失或失明。

◆ 為避免感染，請勿碰觸藥水瓶口任何表面。

◆ 為避免污染藥水，請勿更換藥水的瓶子或容器。

◆ —: Human Crystalline Lens(25 year old person)